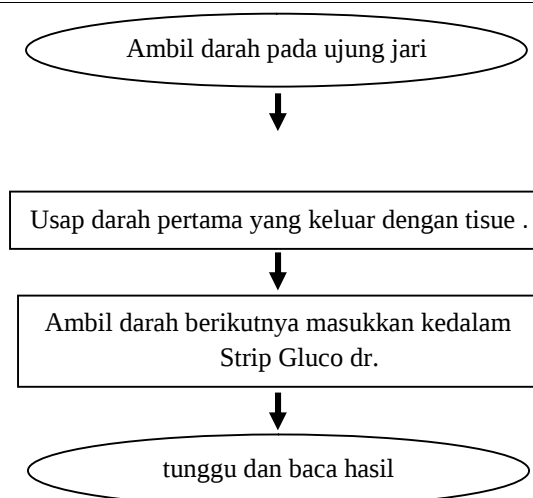


		GULA DARAH			
		SOP	No Dokumen : 445/ / IV.03/ P/III/2018		
			Nomor Revisi : Revisi 1		
			Tanggal Terbit :		
Halaman :					
UPT. PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI					<u>CATUR SUPRIANTO</u> NIP. 19650411 198703 1 006
A.	Pengertian	Serangkaian tindakan untuk pemeriksaan gula darah.			
B.	Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah langkah dalam melakukan pemeriksaan gula darah di UPT Puskesmas Rawat Inap Sukadamai			
C.	Kebijakan	keputusan Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Sukadamai Tentang Jenis- jenis pemeriksaan Laboratorium yang tersedia di Puskesmas Rawat Inap Sukadamai			
D.	Referensi	Pedoman pelayanan laboratorium di UPT Puskesmas Rawat Inap Sukadamai			
E	Alat dan Bahan	1. Easy Touch 2. Alkohol Pad 3. Strip Easy touch 4. darah vena/darah kapiler 5. Tissue 6. Lanset			
F	Prosedur :	Diagram Alir			
	1. Ambil darah dengan cara mengusap ujung jari dengan kapas alkohol, tusuk ujung jari dengan menggunakan lanset, hapus darah pertama dengan tissue. 2. Masukkan darah kapiler kedalam Strip. 3. Tunggu ± 20 detik baca hasil yang didapat.				
G	Unit terkait	1. BP 2. KIA			

		3. Gigi
H	Dokumen terkait	Register Harian Laboratorium

I. Rekaman Historis.

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan tgl

DAFTAR TILIK SOP

No	Langkah – langkah Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
	1. Ambil darah dengan cara mengusap ujung jari dengan kapas alkohol, tusuk ujung jari dengan menggunakan lanset, hapus darah pertama dengan tissue. 2. Masukkan darah kapiler kedalam Strip. 3. Tunggu ± 20 detik baca hasil yang didapat.			