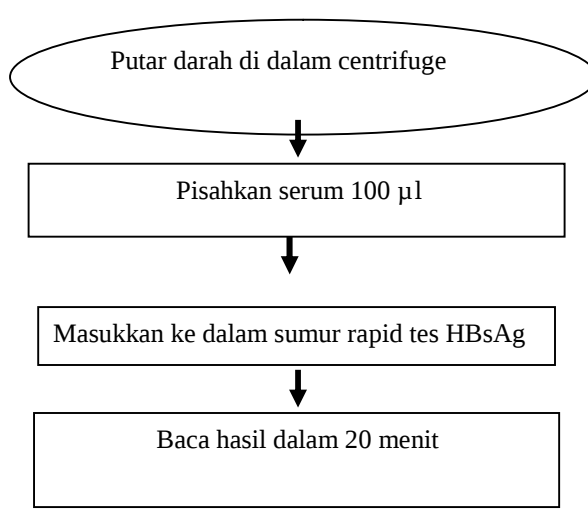


		PEMERIKSAAN HIV (Rapid)		
SOP	No Dokumen	:	445/ / IV.03/ P/III/2020	
	Nomor Revisi	:		
	Tanggal Terbit	:		
	Halaman	:		
UPT. PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI				<u>CATUR SUPRIANTO</u> NIP. 19650411 198703 1 006
A.	Pengertian	HIV adalah tes untuk memeriksa atau mendeteksi adanya HIV dalam darah		
B.	Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah langkah dalam melakukan pemeriksaan HIVsecara kualitatif secara cepat di UPT Puskesmas Rawat Inap Sukadamai		
C.	Kebijakan	keputusan Kepala UPT Puskesmas Nomor : 445/ / / IV.03/SK/P/I/2020 Tentang Jenis- jenis pemeriksaan Laboratorium yang tersedia di Puskesmas Rawat Inap Sukadamai		
D.	Referensi	Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas		
E.	Alat dan Bahan	1. Tourniquet 2. Lancet 3. Kapas alkohol 4. Rapid tes HIV		
F.	Prosedur :		Diagram Alir	
	1. Putar darah di dalam centrifuge 3000 rpm selama 5 menit 2. Pisahkan serum kemudian pipet serum sebanyak 100µl 3. Bukalah tes RDT HIV (Rapid)dan letakkan diatas meja yang rata dan bersih 4. Masukkan serum kedalam sumur yang terdapat di dalam rapid tes 5. Baca hasil dalam 20 menit Hasil Reaktif : Bila terdapat dua garis merah pada bagian control/ C dan bagian tes/ T pada strip tes		 <pre>graph TD A([Putar darah di dalam centrifuge]) --> B[Pisahkan serum 100 µl] B --> C[Masukkan ke dalam sumur rapid tes HBsAg] C --> D[Baca hasil dalam 20 menit]</pre>	

	Non reaktif : Bila terdapat satu garis merah pada bagian control / C pada strip tes Invalid : Bila terdapat satu garis merah (pada bagian T) atau tidakada garis merah pada strip tes		
G	Unit terkait	1. Ruang BP. 2. Pelayanan KIA / KB.	
H	Dokumen terkait	Register Lab	

I. Rekaman Historis.

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan tgl

DAFTAR TILIK SOP

No	Langkah – langkah Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
	1. Putar darah di dalam centrifuge 3000 rpm selama 5 menit 2. Pisahkan serum kemudian pipet serum sebanyak 100µl 3. Bukalah tes RDT HIV (Rapid)dan letakkan diatas meja yang rata dan bersih 4. Masukkan serum kedalam sumur yang terdapat di dalam rapid tes 5. Baca hasil dalam 20 menit Hasil Reaktif : Bila terdapat dua garis merah pada bagian control/ C dan bagian tes/ T pada strip tes Non reaktif : Bila terdapat satu garis merah pada bagian contol / C pada strip tes			

